

VisionArray® Arrays for DNA analysis

Το σύστημα VisionArray Analysis Package MultiScan παρέχει την απλή ανίχνευση και γρήγορη ανάλυση του VisionArray Chip, με δεδομένα από έξι (6) VisionArray Chips ταυτόχρονα. Τα VisionArray Chips πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το VisionArray PreCise Master Mix και το VisionArray Detection Kit για την ποιοτική ανίχνευση των ειδικών αλληλουχιών DNA.

Σύντομες οδηγίες σάρωσης*

- Ανοίξτε το VisionArray Scanner V600 Photo
- Ανοίξτε τον Η/Υ
- Επιλέξτε έναν χρήστη στην οθόνη εκκίνησης και πιέστε σάρωση (Scan).
- Τοποθετήστε τα chip στον υποδοχέα πλακιδίων και πιέστε ανίχνευση ταυτότητας πλακιδίου (Detect Slide IDs).
- Εισάγετε δεδομένα περιστατικού, πιέστε σάρωση (Scan) για την υποβολή αρχικών πληροφοριών στην βάση δεδομένων.
Εναλλακτικά, πιέστε σάρωση (Scan) απευθείας, για την αποθήκευση και ανίχνευση όλων των θέσεων χωρίς την εισαγωγή προτεινόμενων δεδομένων.
- Ελέγξτε την σάρωση του κάθε τσιπ.
OK: Ελέγξτε την επιλογή OK και προχωρήστε επιλέγοντας ανάλυση (Analysis).
Not OK: Πιέστε επανασάρωση (Rescan).
- Ελέγξτε την ανάλυση της σάρωσης.
OK: Πιέστε Επόμενο (Next) για την δημιουργία της αντίστοιχης αναφοράς.
Not OK: Διορθώστε στο (Expert mode).
- Κλείστε το παράθυρο ή πιέστε Εκτύπωση (Print Report) αναφοράς

Εμπορικά σήματα: Το VisionArray® αποτελεί εμπορικό σήμα της 42 life sciences GmbH & Co. KG

M-5122-1-GR, V2.0-GR-07-20

δεδομένα
v

VisionArray Analysis Package MultiScan

VisionArray® Arrays for DNA analysis



- Συνδέστε την παροχή ρεύματος του ① ③ ⑥ σε ② (Δεν περιέχεται)



- Συνδέστε ③ σε ⑥. Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε μία ελεύθερη θήρα USB 3.0 του φορητού Η/Υ για την ταχεία μεταφορά



- Συνδέστε ① ④ ⑤ σε ③
- Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα μεταφοράς είναι ανοιχτό και ξεκλειδωτο.

Θρύλος

- ① Scanner V600 Photo
- ② Πρίζα
- ③ Διακλαδωτής USB
- ④ Εξωτερικός κληρός δίσκος
- ⑤ Ποντίκι Η/Υ
- ⑥ Φορητός Η/Υ
- ↓ Κλείδωμα μεταφοράς

*Το παρόν είναι ένα συνοπτικό πρωτόκολλο για το VisionArray® Analysis Package MultiScan και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τα επίσημα εσώκλειστα οδηγίων χρήσης !

Εμπορικά σήματα: Το VisionArray® αποτελεί εμπορικό σήμα της 42 life sciences GmbH & Co. KG

M-5122-1-GR, V2.0-GR-07-20

VisionArray Analysis Package MultiScan